

GLOBACID[®] SF med

**Aminų pagrindu pagaminta paviršių
ir medicinos prietaisų paviršių
valymo ir dezinfekavimo priemonė
koncentratas**

Produkto savybės

- taupiai naudojama, plataus poveikio spektro
- sudėtyje nėra aldehydų
- labai gerai valanti
- tinka daugeliui medžiagų (metalui, plastikui, organinio stiklo)
- veikia Tbc, ŽIV, hepatito B virusą, noro virusą
- neutralaus kvapo

Sudėtis

ketvirtiniai amonio junginiai 6%, amino 5,5%, poliglikolio eteris, guanidinas, komplekso sudaromoji medžiaga.

Poveikio spektras

Produktas turi virucidinį (hepatito B virusas, hepatito C virusas, ŽIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Noro ir Papova virusas ir t.t.), baktericidinį, (*Mycobacterium terrae*, MRSA, *P.aeruginosa*, *E.coli* ir t.t.), sporicidinį ir fungicidinį poveikį.

Naudojimas

„Globacid[®] SF med“ yra naudojamas iš įvairių medžiagų pagamintų vandeniui atsparių paviršių (durims, palangėms, spintoms, grindims, sienoms, lovų kraštams, virtuvės inventoriui, jungikliams ir pan) ir medicinos įrangai (pacientų kėdėms, neštuvams, lovos rėmams ir t.t.) valyti ir dezinfekuoti *šluostant arba mirkant*. Tinka ir operacinių inventoriui valyti bei dezinfekuoti, *šluostant arba mirkant*. „Globacid[®] SF med“ gaminamas ir koncentrato pavidalu. Atsižvelgiant į norimą poveikį, iš koncentrato yra gaminamas darbinis tirpalas. „Globacid[®] SF med“ valymo savybės bus geresnės, jei tirpalui gaminti naudosite drungną arba kambario temperatūros vandenį. Praėjus veikimo laikui, nuplaukite su maistu besiliečiančius paviršius.

DĖMESIO! Vengti kontakto su aldehydų ir aminų pagrindu pagamintais produktais. Aldehydų pagrindu pagamintais produktais apdoroti paviršiai turi būti nuvalyti nuo aldehydų likučių.



Tirpalo koncentracija ir poveikio laikas:

Bendroji dezinfekcija (mažo organinio užterštumo paviršiai)	0,25% (2,5ml/l)	15min
Esant infekcijai (didelio organinio užterštumo paviršiai))	1,25% (12,5ml/l)	15min
Sporicidinis poveikis	2,5% (25ml/l)	15min

Įspėjimas

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *bespalvis, skaidrus skystis*
Kvapas: *būdingas aminui*
pH: *10,4 (20°C)*
Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*
Tankis: *0,99 g/cm³ (20°C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–30°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atliekų šalinimas

Darbinis tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš utilizuojant pakuotę, perplaukite jos vidų vandeniui.

Atitiktis standartams

EN 1276, EN 14476, EN 13727, EN 13624,
EN 13704, EN 14348, EN 14561, EN 14562

Kiti bandymų būdai

DVG, DGHM/ÖGHMP, RKI/DDV

Gaminys pažymėtas CE ženklu pagal Medicinos įrangos direktyvą.



Biocido registravimo pažymėjimo NR.:
(10-14 17.5Mr)BPR-219(A-0204PNO603820-21-123)

Atitinka maisto pramonei, kosmetikos ir kitoms sritims keliamus reikalavimus.

Pakuotė

1L butelis
5L kanistras

Goodpoint Chemicals OÜ
<http://www.goodpointchemicals.com>
Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija
Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522
info@goodpointchemicals.com